

white EXPERTS™

BRUSH & BLEACH

Des dents plus blanches en 7 jours

WHITE EXPERTS Brush & Bleach est un système de blanchiment dentaire confortable. Le résultat optimal s'obtient par la combinaison unique du prétraitement à la brosse à dents de doigt, pourvue de sa structure de polypropylène, et du gel de blanchiment inoffensif.

1. La brosse à dents de doigt enlève les décolorations de la surface dentaire occasionnées par le café, les baies, le tabac, le vin, le thé, etc.
2. La deuxième étape consiste dans le soin des dents apporté par le gel de blanchiment. Les composants actifs du gel pénètrent l'émail libérant ainsi les radicaux libres d'oxygène. Ceux-ci décolorent chimiquement les pigments dentaires. Le gel a une valeur pH neutre et la surface dentaire ne devient pas plus rugueuse, ce qui accélérerait leur coloration.

Le blanchiment des dents agit uniquement sur les dents vitales et non sur les couronnes, bridges, placages et plombages. En outre, la combinaison des composants actifs avec le fluorure de sodium exerce une action anti-caries et reminéralisante, tout en minimisant les éventuels symptômes de

sensibilité de courte durée susceptibles de survenir après un traitement de blanchiment dentaire.

WHITE EXPERTS Brush & Bleach contient 14 brosses à dents de doigt ainsi qu'un stick de blanchiment dentaire. Un résultat optimal s'obtient moyennant un traitement de 15 jours consécutifs.

Nettoyage dentaire intensif avec la brosse à dents de doigt.

Les brosses à dents de doigt **WHITE EXPERTS** ont été conçues pour enlever le film qui se dépose sur la surface de vos dents. Par ailleurs, la structure grillagée polypropylène de la brosse à dents de doigt constitue une base idéale pour un blanchiment dentaire optimal.

1. Ouvrez le sachet et retirez-en la brosse.
2. Glissez la brosse sur votre index, en orientant la face la plus longue vers les dents.
3. Brossez-vous les dents avec la face longue de la brosse.
4. Retirez la brosse de votre doigt et jetez-la.

Ingrédients de la couche active: huile de menthe, menthol et stéviolside.

La brosse à dents de doigt peut s'utiliser également pour vous brosser les dents et comme rafraîchissant avant une réunion ou en cours de route.

Le stick de blanchiment des dents **WHITE EXPERTS** est conçu pour un usage journalier – jusqu'à 15 jours d'affilée.

1. Retirez le bouchon.
2. Tournez à la roulette doseuse et appliquez le gel sur la surface dentaire.
3. Laissez sécher le gel pendant 1 minute et ensuite ne vous rincez pas la bouche.
4. Attendez 30 minutes avant de fumer, manger ou boire.
5. Refermez le stick après usage pour éviter qu'il ne dessèche.

En cas d'usage correct, les premiers résultats sont visibles au bout d'une semaine.

Effet blanchissant

La carte des couleurs jointe vous permet de mesurer le résultat du blanchiment. En cas d'usage correct, vous verrez les premiers résultats au bout de 4 à 7 jours. Le résultat final diffère d'une personne à l'autre et dépend de votre style de vie ainsi que de l'état général de vos dents.

Précautions

- a. À garder hors de portée des enfants.
- b. Évitez tout contact des yeux avec le gel.
- c. À conserver à température ambiante et dans un environnement sec. Ne pas exposer à la lumière solaire directe.
- d. À ne pas utiliser pendant la grossesse.

INCI: AQUA, GLYCERIN, PROPANEDIOL, POLYACRYLIC ACID, TRIETHANOLAMINE, MENTHOL, SODIUM FLUORIDE, UREA PEROXIDE

WHITE EXPERTS
Super bright tooth shade guide

Tableau dentaire (nuances de couleur des dents)

Indiquez la couleur de vos dents avant d'entamer le traitement. Comparez la couleur de vos dents avec leur couleur initiale après 4 à 7 jours d'usage correct.

Un produit de:
Lemmon Pharma International,
Harebeeksestraat 81, 8520 Kuurne,
Belgium

1 5 3 4 2 0 1 8 9 10 11 15

white EXPERTS™

BRUSH & BLEACH Wittere tanden in 7 dagen

WHITE EXPERTS Brush & Bleach is een comfortabel systeem voor zacht tandbleken. Het optimale resultaat wordt bekomen door de unieke combinatie van de voorbehandeling met de vingerborstel met de polypropyleen roosterstructuur en de zachte bleekgel.

1. De vingerborstel verwijdert verkleuringen op het tandoppervlak veroorzaakt voor het gebruik van koffie, bessen, tabak, wijn, tea, etc.
2. De tweede stap is de tandverzorging met de bleekgel. De actieve bestanddelen van de gel gaan het glazuur binnen en zetten vrije zuurstofradicalen vrij. Hierdoor worden de tandpigmenten chemisch kleurloos gemaakt. De gel heeft een neutrale pH-waarde en het tandoppervlak wordt niet ruwer waardoor er anders sneller vlekken zouden ontstaan.

Het bleken van de tanden werkt enkel op vitale tanden en niet op kronen, bruggen, fineer en andere soorten vullingen. De combinatie van de actieve bestanddelen met natriumfluoride heeft een bijkomende anti-carogene en remineraliserende werking en minimaliseert de mo-

gelijks korstonding optredende gevoeligheids-symptomen na een tandbleekbehandeling.

WHITE EXPERTS Brush & Bleach bevat 14 vingerborstels en één tandbleekstick. Voor een optimaal resultaat dient de behandeling 14 opeenvolgende dagen te worden gedaan.

Intensieve tandreiniging met de vingerborstel.

WHITE EXPERTS vingerborstels werden ontworpen om de filmlaag aan vervuiling die zich aan je tandoppervlak hecht te verwijderen. Daarnaast is de polypropyleen roosterstructuur van de vingerborstel een ideale basis voor het optimaal tandwitten.

1. Maak het zakje open en haal de borstel eruit.
2. Schuif de borstel over je wijsvinger, met de langste zijde gericht naar je tanden.
3. Wrijf op je tanden met de lange zijde van de borstel.
4. Verwijder de borstel van je vinger en werp deze weg.

Ingrediënten van de actieve coating: pepermintolie, menthol en stevioside.

De vingerborstel kan ook worden gebruikt als tandreiniger en verfrisser voor meetings en onderweg.

WHITE EXPERTS tandbleekstick werd ontwikkeld voor dagelijks gebruik tot 14 opeenvolgende dagen.

1. Verwijder de dop.
2. Draai aan de achterzijde en breng de gel aan op de voorkant van je tanden.
3. Laat de gel 1 minuut drogen en spoel niet.
4. Wacht 30 minuten met roken, eten en drinken.
5. Sluit de stick na gebruik om uitdrogen te voorkomen.

Bij correct gebruik zijn de eerste resultaten zichtbaar na één week.

Witmakend effect

Met de bijgevoegde kleurenkaart kun je je bleekresultaat meten. Bij correct gebruik zul je de eerste resultaten na 4-7 dagen zien. Het uiteindelijke resultaat verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van je levensstijl, alsook van de algemene toestand van je tanden.

Voorzorgsmaatregelen

- a. Buiten het bereik van kinderen houden.
- b. Vermijd contact van de ogen met de gel.
- c. Bewaar op kamertemperatuur en in een droge omgeving. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
- d. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

INCI: AQUA, GLYCERIN, PROPANEDIOL, POLYACRYLIC ACID, TRIETHANOLAMINE, MENTHOL, SODIUM FLUORIDE, UREA PEROXIDE

WHITE EXPERTS
Super bright tooth shade guide

Tandtabel (tand-kleurtinten)

Duid je tandkleur aan voordat je de behandeling begint. Vergelijk, na het correct gebruik, na 4-7 dagen met je initiële tandkleur.

Een product van:
Lemon Pharma International,
Flarebleekstraat 81, 8520 Kuurne,
Belgium

1 5 3 4 2 0 1 8 9 10 11 15